


DÜŞÜK SICAKLIK HİDROJEN PEROKSİT (H₂O₂) GAZ PLAZMA STERİLİZATÖR

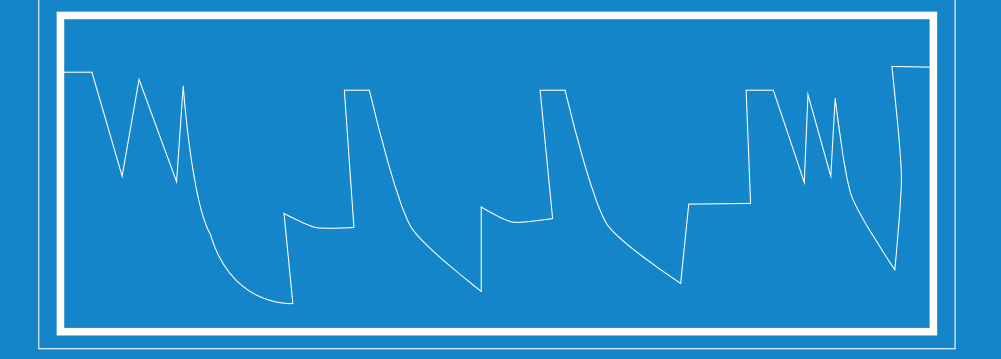

Ön Şartlandırma Sterilizasyon Ventilasyon

Konusunda uzman biliminsanları tarafından geliştirilen GOLDBERG S-MAX serisi sahip olduğu bilimsel ve teknolojik yeniliklerle düşük sıcaklıklarda maksimum sterilizasyonu minimum sürelerde gerçekleştirir.

Maksimum Performans

Maksimum Hız

Maksimum
Kullanım Kolaylığı

Maksimum Güvenlik

Maksimum
Sterilizasyon

Maksimum Kabin Hacmi

Maksimum Kalite

Maksimum Kontrol



PROGRAM SEÇME KILAVUZU

LÜMENSİZ PROGRAM / 27 dakika Lümensiz Aletler / Basit Geometrisi Olan

- Ameliyathane lambası tutacakları
- Makas, forseps gibi örtülü yüzeyi olan aletler
- Lümensiz genel cerrahi aletleri
- Kürek tipi defibrilatör elektrotları
- Oftalmoloji aletleri
- Kablolar ve kordonlar
- Bataryalar, kumanda aletleri, termometreler,
- Lümeni olmayan sert, yarı sert ve esnek skoplar (Rinoskop, otoskop, vb)
- Kameralar, lazer problemler, fiber-optik kablolar
- Elektrokoter uçları
- Ultrasonik problemler

STANDART PROGRAM / 45 dakika Endoskoplar ve Diğer Lümenli Aletler/ Tüm Lümensiz Program Alet ve Cihazları

- Rijit endoskoplar, bronkoskoplar
- Cerrahi endoskoplar, histeroskoplar, sistoskoplar, üreteroskoplar, koledoskoplar
- 1.5 mm veya daha büyük bir iç çapa ve 100 cm veya daha kısa bir uzunluğa sahip tek kanallı esnek endoskoplar
- Aynı çapa sahip 85 cm uzunluğa kadar çift kanallı esnek endoskoplar
- 30 cm'e kadar paslanmaz çelik lümenler
- daVinci® Endoskoplar

YOĞUN PROGRAM / 57 dakika En Uzun ve Dar Kanallar ve Lümenler Tüm Lümensiz ve Standart Program Aletleri

- 1 m'den uzun ve 0,7 mm iç çapa kadar esnek lümenler
- 30 cm'den uzun paslanmaz çelik lümenler
- Rijit ve yarı rijit endoskoplar ve laparoskopik alet setleri (artroskoplar, sistoskoplar, üreteroskoplar)
- Paslanmaz çelikten mamul trokar, rezektoskop gibi aletler, kanüller.

PROGRAM SEÇİMİNİN İKİ ALTIN KURALI

- Farklı aletler içeren bir sterilizasyon yükü içinde, en uzun süreli programı gerektiren aletin programı seçilir. Bu aletten tek bir adet olsa bile!
- İki program arasında kararsızlık yaşarsanız, süresi daha uzun olanı tercih ediniz.

- Kabin içerisine kesinlikle nemli malzeme koymayınız. Cihaz içerisine yerleştirilen malzemelerin tamamen kurutulmuş olduğundan emin olunuz.

- Sterilizasyon kabinini, gazın her pakete rahatça nüfuz edebileceği şekilde doldurunuz. Kabin hacminin en az %30'unun boş bırakılması önerilmektedir.

Kullanıcı ve çevre dostudur, atık olarak sadece su ve oksijen ortaya çıkar.



Alman akredite kuruluşu Hyggen GmbH firması tarafından test edilip onaylanmıştır.



Eryiğit yaşam için teknolojiler

27
yıl

www.eryigit.com.tr

DÜŞÜK SICAKLIK

HİDROJEN PEROKSİT (H₂O₂) GAZ PLAZMA STERİLİZATÖR

